

ポリアミド 合成非吸収性縫合糸

TSUGE LOOPED SUTURE

腱・神経縫合用
津下式ループ針


販売名：ナイロン縫合糸-KK

認証番号：229AFBZX00015000



腱の縫合方法

ループ針を用いた腱の結合方法

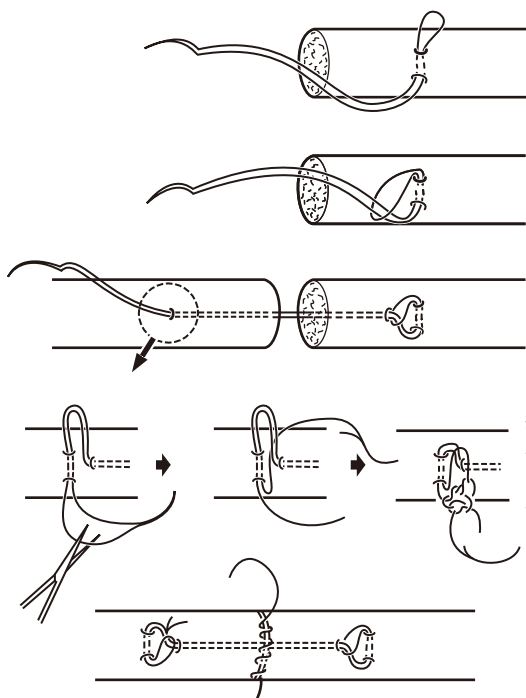

結節方法
二重結紮1回
+
単純結紮2回

腱結合部は結節縫合4カ所又は連続結合。

角針 3/8円 (弱弯) 丸針 3/8円 (弱弯)



BB-8mm

DD-8mm



BB-10mm

DD-10mm



BB-12mm

DD-12mm




BB-15mm

DD-15mm



腱・神経結合用ループ針

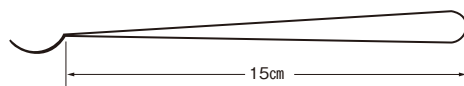

広島大学整形外科 名誉教授 津下健哉先生御指導

角針 REVERSE CUTTING



針サイズ	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.						
				8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
BB 弱弯 3/8 Circle										
BB-8mm 	1本×12袋	青	30cm	NBB008	NBB007	NBB006	NBB005	NBB004		
BB-10mm 	1本×12袋	青	30cm		NBB017	NBB016	NBB015	NBB014	NBB003	
BB-12mm 	1本×12袋	青	30cm			NBB026	NBB025	NBB024	NBB013	
BB-15mm 	1本×12袋	青	30cm				NBB035	NBB034	NBB023	NBB002

丸針 TAPER POINT



針サイズ	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.						
				8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
DD 弱弯 3/8 Circle										
DD-8mm 	1本×12袋	青	30cm	NDD008	NDD007	NDD006	NDD005	NDD004		
DD-10mm 	1本×12袋	青	30cm		NDD017	NDD016	NDD015	NDD014	NDD003	
DD-12mm 	1本×12袋	青	30cm				NDD025	NDD024	NDD013	
DD-15mm 	1本×12袋	青	30cm				NDD035	NDD034	NDD023	NDD002